

TUDNIVALÓK AZ ALKALMAZÁS ELŐTT

A hibák elkerülése érdekében mindig, minden injekcióbeadás előtt ellenőrizze a gyógyszer csomagolását és az injekciós toll címkéjét, hogy meggyőződjön arról, hogy a megfelelő toll van Önénél, különösen abban az esetben, ha egynél több injekciós készítményt használ.

MIRE VAN SZÜKSÉG A GYÓGYSZER BEADÁSÁHOZ?



STERIL TŰRE*



ALKOHOLOS
TÖRLŐKENDŐRE*



SZŰRÁSBIZTOS
TARTÁLYRA*

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLL HASZNÁLATÁRÓL

- Mindig, minden injekcióbeadáshoz használjon egy új tűt. Az injekciós tűk ismételt használata fokozza a tűk eltömődésének kockázatát, ami túl sok vagy túl kevés inzulin beadását okozhatja. Minden használat után biztonságosan dobja el a tűt.
- A betegségek egyik személyről a másikra történő átvitelének megelőzése érdekében az injekciós tollakat soha nem használhatja egynél több személy, még akkor sem, ha az injekciós tűt kicserélték.
- Csak a Suliqua injekciós tollal kompatibilis tűket használjon.
- Minden injekcióbeadás előtt el kell végezni egy biztonsági próbát.
- Ha úgy gondolja, hogy az injekciós tolla sérült, ne használja. Szerezzen be egy újat. Ne próbálja megjavítani a tollat.
- Dobja ki a használt injekciós tűt egy szűrásbiztos tartályba, vagy a gyógyszerésze, illetve a helyi hatóságok utasításának megfelelően.

*Nincs mellékelve a SULIQUA injekciós tollhoz.